

Acceptation des échantillons

PARASITOLOGIE				
ANALYSE	PRELEVEMENT	RECOMMANDATION	METHODE	CONSERVATION ET ACHEMINEMENT
Recherche et identification de parasites externes	Grattage cutané: croûtes,poils	- Grattage cutané à la périphérie de la lésion jusqu'à la rosée sanguine pour les Sarcoptes - Presser le pli de peau préalablement pour les Demodex	Examen direct	
Recherche d'œufs de parasites internes dans les excréments	Matière fécale	Fraîchement récupérée dans le rectum de la bête ou fraîchement émise sur la litière (environ 20g)	Examen quantitatif par flottaison	Acheminement au laboratoire dans un délai <3jours sous froid positif
Recherche de larves L1 de strongles pulmonaires	Matière fécale ou poumon	Fraîchement récupérée dans le rectum de la bête ou fragments de poumon (environ100g)	Baerman + Mac kenna pour les bovin	Acheminement rapide au laboratoire sous froid positif (<24h ET <6H pour les bovins recommandé)
Recherche de cryptosporidies	Matière fécale	Environ 10g	Coloration de Heine	Acheminement rapide au laboratoire sous froid positif (<24h recommandé)
Recherche de giardia	Matière fécale	Environ 10g	Immuno-chromatographie	Acheminement rapide au laboratoire sous froid positif (<24h recommandé)

Pour l'envoi des prélèvements se référer à L'Arrêté en cours relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres